

Bitte vor Gebrauch lesen!

Gebrauchsanweisung für orthopädische Einlagen

Sie erhalten heute Ihre von uns gefertigten Einlagen. Diese haben wir sorgfältig nach den Vorgaben Ihres Arztes und nach unseren Erkenntnissen aus dem Beratungsgespräch gefertigt. Beachten Sie aber, dass die Einlagen nur ihren Zweck erfüllen, wenn die nachfolgenden Anweisungen befolgt werden:

- Tragen Sie Ihre Einlagen zu Beginn nur stundenweise. Erhöhen Sie die Tragezeit täglich. Nach 10-14 Tagen sollten die Einlagen problemlos den ganzen Tag getragen werden können.
- Kommen Sie spätestens 6 Wochen nach Erhalt Ihrer Einlagen zur Kontrolle zu uns.
- Die gewünschte Wirkung entfalten Ihre Einlagen nur in den Schuhen, in die sie von uns eingepasst wurden.
- Sollten Sie die Einlagen in anderen Schuhen tragen, achten Sie auf dafür geeignetes Schuhwerk (ausreichende Länge und Breite).
- Sollten Sie Fragen bezüglich passendem Schuhwerk haben kontaktieren Sie uns.
- Ihre Einlagen sind mit links (L) und rechts (R) gekennzeichnet. Achten Sie darauf sie entsprechend in die Schuhe zu legen.
- Tragen Sie immer Strümpfe.
- Diese Einlagen dürfen nicht in Sicherheitsschuhen getragen werden.
- Kontrollieren Sie Ihre Füße zu Beginn (14 Tage) täglich auf Druckstellen, Hautrötungen und Blasenbildung. Sollten Sie Auffälligkeiten feststellen oder Schmerzen haben, tragen Sie die Einlagen nicht mehr und nehmen unverzüglich Kontakt zu uns auf.
- Bei Kindern ist unbedingt auf das Wachstum zu achten. Beim Kauf von neuen Schuhen müssen die Einlagen kontrolliert werden. Ggf. sind dann neue, an die Fußgröße angepasste Einlagen erforderlich.

Ihre Einlagen haben keine festgelegte Nutzungsdauer. Diese ist abhängig von Art und Umfang des Gebrauchs. Kommen Sie daher bitte regelmäßig zu Kontrolle. Sollten Sie einen der folgenden Punkte an Ihren Einlagen feststellen, vereinbaren Sie umgehend einen Termin mit uns:

- Die Decksohle löst sich, hat Risse, ist brüchig oder dunkel verfärbt.
- Das Material ist brüchig oder porös.
- Die gewünschten Dämpfungseigenschaften sind nicht mehr vorhanden.
- Die Einlage ist extrem verformt.

Damit Ihre Einlagen möglichst lange ihre Wirkung behalten, berücksichtigen Sie die nachstehenden Pflegehinweise:

- Wechseln Sie Ihre Einlagen täglich.
- Die Einlagen sind nicht für die Waschmaschine geeignet. Reinige Sie sie mit einem feuchten Tuch und bei Bedarf mit etwas Desinfektionsmittel.
- Sollten die Einlagen nass werden, trocknen Sie diese an der Luft. Niemals auf Heizung oder Ofen legen.

Für weitere Fragen, Wünsche und Anregungen sprechen Sie uns bitte an. Gern nehmen wir uns die Zeit für ein persönliches Gespräch.

Verwendete Materialien:

- Kork EVA Thermoplast PUR
 Leder Alcantara Lederimitat _____

ACHTUNG! Wenn Sie Ihre Einlagen nicht für Ihre Arbeitsschuhe erhalten, dürfen Sie diese in keinem Fall in diesen tragen, da sonst Ihr Versicherungsschutz erlöschen kann.

Hierfür sind Einlagen nach den Bestimmungen der Kostenträger nach DGUV Regel 112-191 vorgesehen. Fragen Sie uns danach!